

AlphaMate

GoScreen



Instrucciones de uso



Acerca de estas instrucciones de uso

Estas instrucciones detallan los usos, funciones y operaciones del producto. Antes de utilizar este producto, lea y comprenda cuidadosamente el contenido de este manual para garantizar su uso adecuado y la seguridad de los pacientes y usuarios.

Estas instrucciones describen el producto en su configuración más completa.

Póngase en contacto con la empresa si tiene alguna pregunta.

Mantenga estas instrucciones cerca del producto para facilitar su consulta oportuna cuando sea necesario.

Todas las ilustraciones incluidas en este manual se proporcionan únicamente como referencia.

Información del producto

Nombre del producto: GoScreen

Fecha: Consulte la etiqueta del producto

Vida útil: 5 años

Responsabilidad del fabricante:

El fabricante será responsable de la seguridad, confiabilidad y desempeño del producto bajo las siguientes condiciones:

El entorno de almacenamiento, el entorno de trabajo y el entorno eléctrico de los productos cumplen con las especificaciones del producto.

Utilice el producto de acuerdo con el manual.

Utilice el producto durante su vida útil.



Funciona con una batería interna y con una autonomía continua aproximada de 2 horas de uso.

A line drawing of the back of the device. A blue circle highlights a small, round, textured knob located on the right side, near the top edge, which is used for volume control.

3.-Botón de menú


Presione el botón de menú para acceder a la lista del directorio del menú. La lista contiene cuatro funciones: modo de cámara posterior, modo de cámara de grabación, reproducción y configuración.

La sección de configuración incluye cuatro funciones: configuración de fecha, configuración de hora, configuración de idioma y formateo de la tarjeta micro SD.




4.-Botones arriba/abajo


Al ingresar a la página del menú o de reproducción, puede presionar el botón de subir y el botón de bajar para cambiar de página.

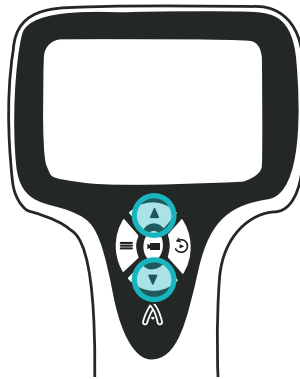

Conecte un extremo del adaptador a la toma de corriente y el otro extremo al puerto USB tipo C de la base de carga. Cuando la batería del dispositivo esté baja, coloque el otoscopio sobre la base de carga para cargarlo.

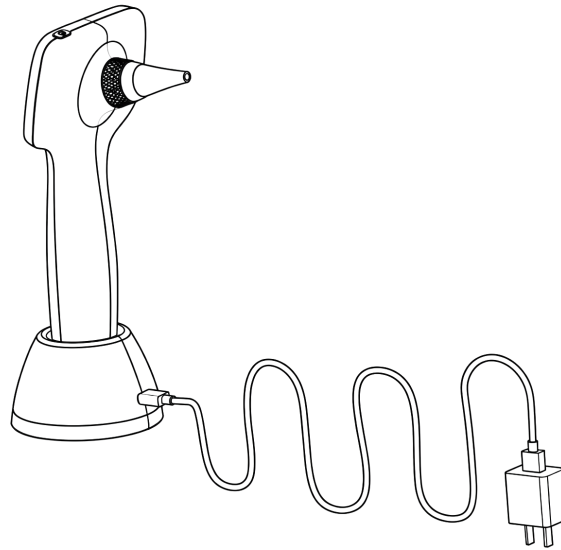

Conecte un extremo del cable de salida de video al puerto USB tipo C del dispositivo y el otro extremo al puerto de video del monitor para la transmisión de datos. Esta interfaz también cuenta con función de carga. Conecte un extremo del adaptador a la toma de corriente y el otro extremo al puerto USB tipo C del dispositivo para cargarlo.

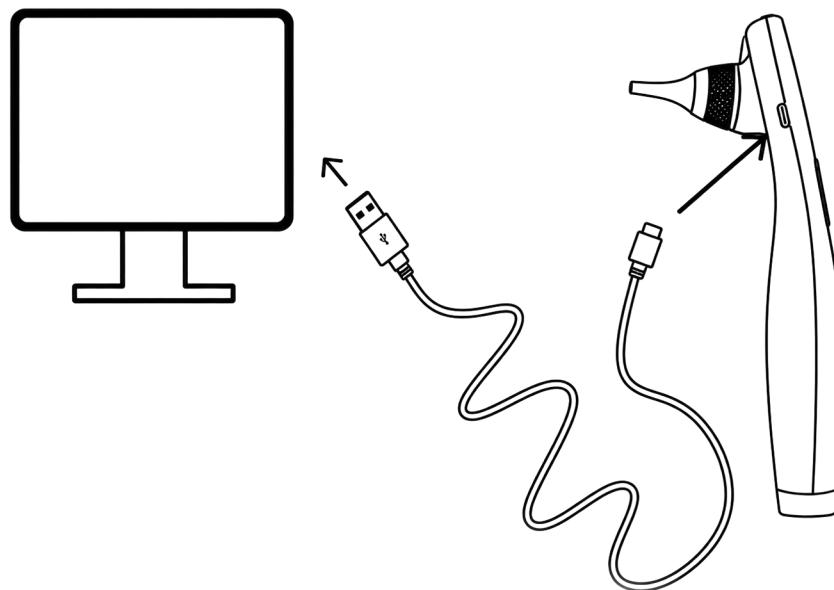

7.-Limpieza y almacenamiento

No se deben dejar caer ni derramar líquidos sobre las superficies del módulo LCD, los pines, ni el mango, ya que no son impermeables.

Se debe evitar la exposición innecesaria a temperaturas y niveles extremos de humedad.

1. A handheld digital thermometer with a black display and a white body.

2. A small, white, dome-shaped container with a blue base.

3. A white rectangular power adapter with two prongs.

4. A coiled black USB cable with a standard USB-A connector and a smaller connector.

5. An open book with a magnifying glass over the letter 'i' on the left page.

6. A small, white, funnel-shaped object.

7. A medium-sized, white, funnel-shaped object.

8. A large, white, funnel-shaped object.

9. A small, white, cylindrical object with a long thin tube.

10. A medium-sized, white, cylindrical object with a long thin tube.