

AlphaMate

StayScreen



Instrucciones de uso



Información del producto

La información contenida en este manual es propiedad del fabricante y debe ser manejada como información confidencial. El manual es solo para referencias de operación y mantenimiento. No se autoriza ningún otro uso. El manual contiene información protegida por la leyes de derechos de autor. Este manual no puede ser modificado, fotocopiado o transcrito a ningún idioma sin autorización por escrito del fabricante. El contenido en este manual puede ser modificado sin previo aviso.

Responsabilidad del fabricante:

Es responsabilidad del fabricante la seguridad, confiabilidad y desempeño del producto siempre que se cumplan todas las siguientes condiciones:

- 1.- La instalación, mantenimiento y actualización del producto han sido realizadas por el personal autorizado y certificado por el fabricante.
- 2.- El almacenamiento, área de trabajo y condiciones eléctricas del producto cumplen con las especificaciones.
- 3.- El producto es utilizado de acuerdo al manual.

Precauciones y advertencias


*El dispositivo StayScreen no contiene ninguna parte que pueda ser reparada por el usuario. Cualquier reparación o mantenimiento debe ser realizado por personal técnico autorizado por el fabricante.

*El dispositivo StayScreen debe ser desconectado antes de la limpieza del equipo.

Consejos de seguridad

- 1.-El manual presenta de forma detallada el uso, función y operación del dispositivo. Lea cuidadosamente el manual antes de utilizarlo por primera vez para asegurar un correcto uso del equipo por seguridad del paciente y el operador.
- 2.-En caso de que alguna información contenida en este manual no aplique para el manejo del dispositivo que adquirió por favor contáctenos.
- 3.-Mantenga el manual cerca del dispositivo para fácil acceso cuando sea necesario.
- 4.-El manual es proporcionado para profesionales de la salud.
- 5.-Las ilustraciones contenidas en el manual son sólo para referencia.
- 6.-El dispositivo es entregado sin esterilizar. Limpie y desinfecte los componentes reusables antes de su primer uso y entre cada paciente.
- 7.-Conecte el dispositivo a una toma de corriente con el adecuado voltaje para su carga.
- 8.-Asegúrese de que el cargador está en buenas condiciones y sin daño, mantenga el cargador alejado de superficies calientes.
- 9.-Riesgo de electrocución. Nunca sumerja el equipo o el cargador. Previo a limpiar el cargador este debe estar desconectado. Todos los componentes del equipo deben estar secos antes de conectarlos.
- 10.-El dispositivo no está diseñado para funcionar con campos electromagnéticos intensos, como los de una resonancia magnética. Los dispositivos médicos están sujetos a precauciones especiales respecto a compatibilidad electromagnética.



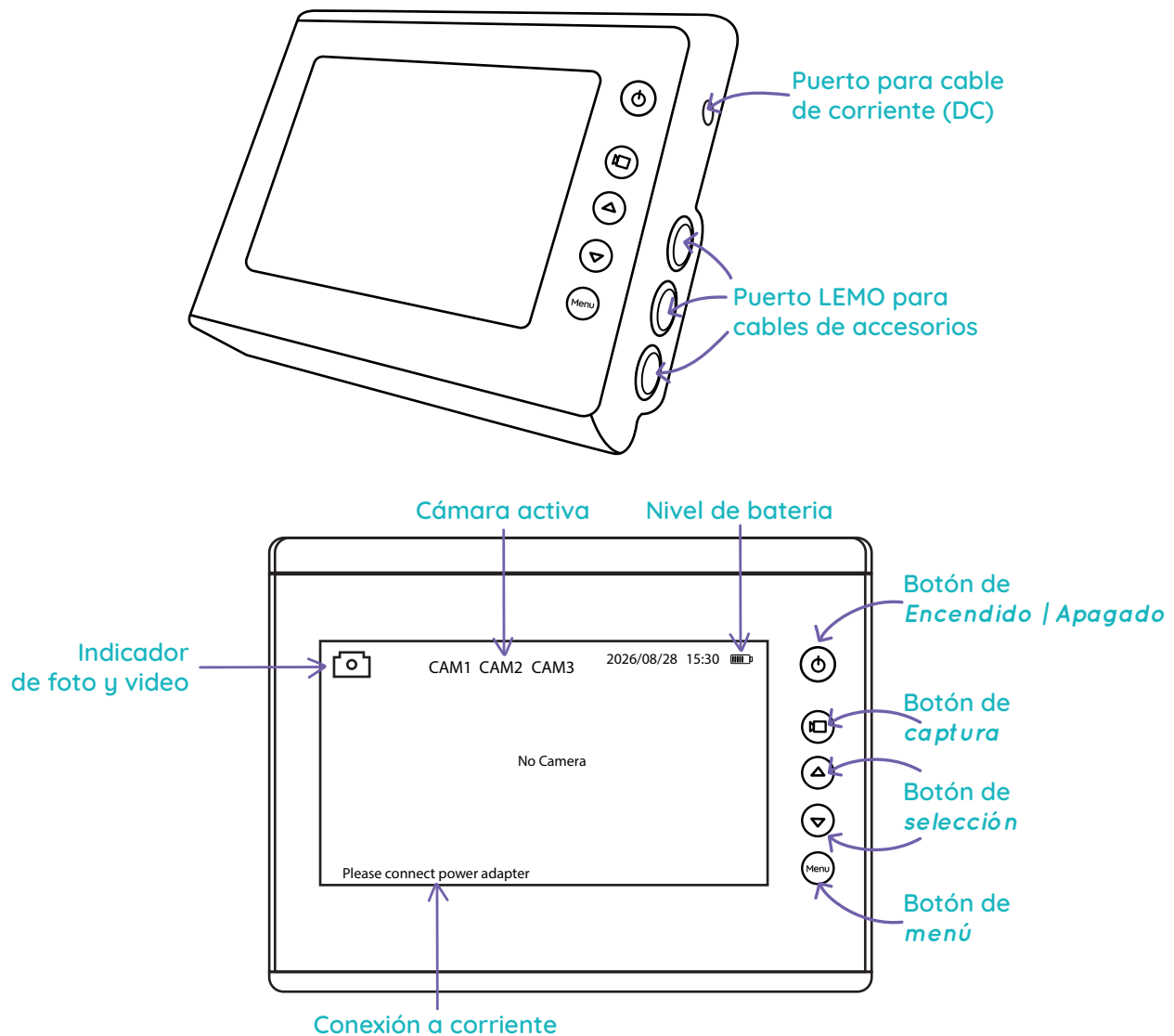

Botones y navegación

1.-Encendido/apagado

- 1.- Encendido: Para encender la pantalla presione el botón de encendido. 
- 2.- Apagado: Para apagar la pantalla presione el botón de encendido durante 2 segundos. 

2.-Menú

1. Para ingresar al menú presione el botón MENU. 
2. Para desplazarse en el menú utiliza los botones de navegación.  
3. Una vez en la opción deseada presione el botón MENU para ingresar.
4. Para regresar al menú anterior seleccione la opción BACK.
5. Para volver a la pantalla principal presione el botón foto/video. 

3.-Ajuste de fecha

- 1.- Ingrese a **SETTINGS** dentro del menú.
- 2.- Seleccione la opción **DATE**.
- 3.- Presione el botón **MENU** para comenzar a editar.
- 4.- Presione el botón de navegación arriba o abajo según lo requiera para ajustar el año y presione nuevamente el botón **MENU** para confirmar.
- 5.- Presione el botón de navegación arriba o abajo según lo requiera para ajustar el mes.
- 6.- Siga los mismos pasos para ajustar el día.

4.-Ajuste de hora

- 1.- Ingrese a **SETTINGS** dentro del menú.
- 2.- Seleccione la opción **TIME**.
- 3.- Presione el botón **MENU** para comenzar a editar.
- 4.- Presione el botón de navegación arriba o abajo según lo requiera para ajustar la hora y presione nuevamente el botón MENU para confirmar.
- 5.- Presione el botón de navegación arriba o abajo según lo requiera para ajustar los minutos.
- 6.- Siga los mismos pasos para ajustar los segundos.

5. -Formatear memoria


- 1.- Ingresa a **SETTINGS** dentro del menú.
- 2.- Seleccione la opción **FORMAT SD CARD**.
- 3.- Presione el botón menú.
- 4.- En el cuadro de diálogo desplazarse con el botón de navegación a la opción **YES** para continuar o **NO** para cancelar el proceso.

Captura de fotografías y video

Instrucciones

- 1.- Para tomar una fotografía presione el botón de **CAPTURA**.
- 2.- Para cambiar a **MODO GRABACIÓN DE VÍDEO** mantenga presionado el botón de captura por 4 segundos.
- 3.- Para **comenzar** a grabar presione nuevamente el botón de **CAPTURA**.
- 4.- Para **detener** la grabación presione nuevamente el botón de **CAPTURA**.
- 5.- Para volver a **MODO FOTOGRAFÍA** mantenga presionado el botón de captura por 4 segundos.

Nota: También puede seleccionar la función de fotografía o video utilizando el botón **MENU** y seleccionando la opción deseada con los botones de navegación, a continuación presione nuevamente el botón **MENU**.

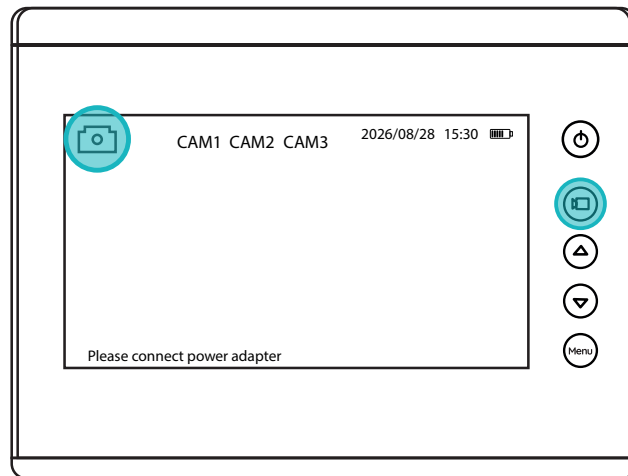


Cambio de cámara

Con la StayScreen puede conectar 3 dispositivos simultáneamente.


Los puertos de conexión se encuentran numerados en orden como muestra la figura 4.

La cámara 1, cámara 2 y cámara 3 pueden seleccionarse presionando el botón de navegación inferior en la **StayScreen**.

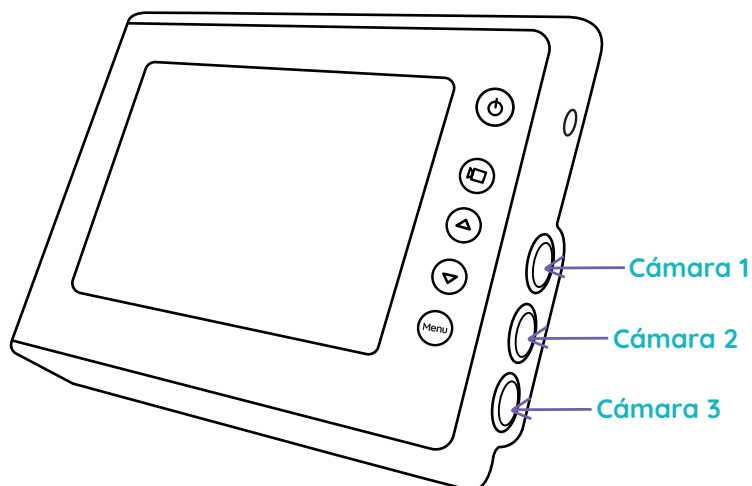

6.-Carga del dispositivo

Conecte un extremo del adaptador a la toma de corriente y el otro extremo al puerto de carga de la pantalla. Conectela cuando los niveles de carga sean bajos.

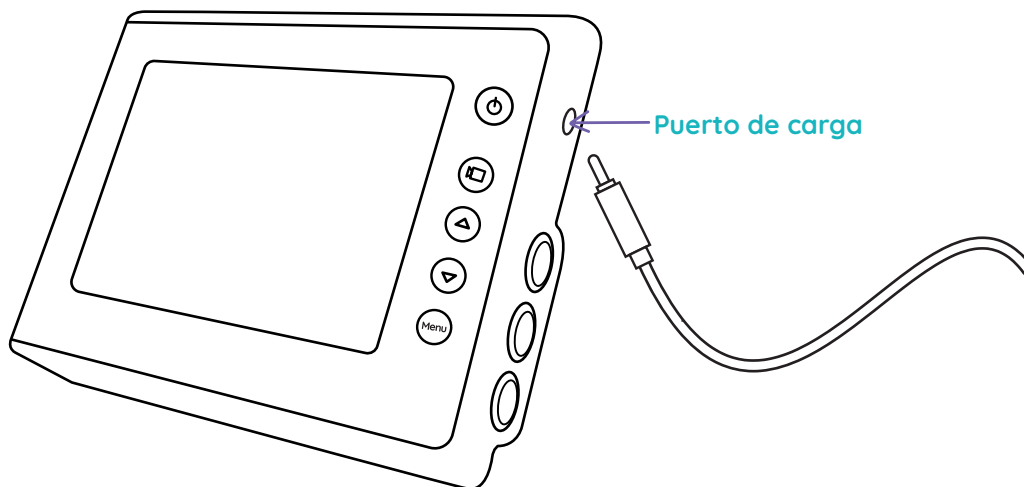



Especificaciones técnicas

StayScreen		
Componente	Descripción	Información técnica
Pantalla	Panel	LCD HD 7 Pulgadas
	Resolución	1280*720 px (RGB)
	Ángulo de visión	>80°
	Peso	750 g
Imagen y vídeo	Captura de fotos y videos	Si
	Memoria de almacenamiento	Micro SD 64 Gb
	Salida de vídeo	HDMI
	Reproductor de fotos y vídeo	Si
Batería	Tipo	Batería de litio recargable
	Capacidad	4300mAh
	Ciclos de vida	300 ciclos
	Duración de batería	>120 min
	Tiempo de carga	< 150 min
Cargador	Incluido	Si
	Entrada	100-250V .50HZ
	Salida	5V 2A
Condiciones de operación	Temperatura	-5C +50C
	Humedad	10%-90%
	Presión	850-1060 hpa
Transporte y almacenamiento	Temperatura	-10 - 50°C
	Humedad	<93%
	Presión	500 - 1060 hpa
Limpieza y desinfección	Limpieza con gasa húmeda en alcohol isopropanol al 70% o cidex o cidex plus. Retire el exceso con una gasa húmeda en agua estéril, seque y conserve en un lugar seco	
Compatibilidad	Mango para lentes con lentes ViewPet rígidos. ViewPet flexibles y GastroFlex	

